

Collare TOT

Torcicollo congenito



Il collare TOT è un efficace aiuto per la terapia per il torcicollo muscolare infantile. Questo collare, che deve essere utilizzato in combinazione al trattamento terapeutico dei bambini con il torcicollo muscolare congenito, è stato progettato per fornire uno stimolo laterale del cranio, grazie ai tubi in nylon di dimensione variabile, che consentono all'utente di allontanarsi da questo stimolo, verso una nuova posizione centrale corretta.

L'assunzione di nuova posizione del capo fornisce la capacità al bambino di resettare la percezione orizzontale del capo, in modo da arrivare alla posizione corretta del capo.

Come funziona e indicazioni per l'uso.

TOT Collar™ è progettato per fornire uno stimolo all'inclinazione laterale del cranio. L'utente si allontana grazie a questo stimolo verso una nuova posizione centrale corretta. L'adozione di una nuova posizione offre la possibilità di ripristinare la percezione dell'orizzontalità e quindi di mantenere la posizione corretta della testa. L'uso del collare TOT viene aggiunto al trattamento conservativo dei neonati con torcicollo muscolare congenito se hanno 4 mesi o più e mostrano un'inclinazione della testa costante di 5 o più gradi. Il bambino deve avere una ROM adeguata (range di movimento) e una reazione di raddrizzamento laterale della testa (controllo della testa e forza) per sollevare la testa dal lato del Collare.

Il TOT Collar™ è pre-assemblato e pronto per essere montato.

